

2. BRANCARD CUILLÈRE

Ce brancard permet d'effectuer le relevage et le transport d'une personne sur des distances réduites.

Exemple d'utilisation :

Relevage d'une victime ayant une suspicion de lésion du rachis

Relevage d'une victime poly fracturée (en remplacement du brancard à lamelles)

La propriété de ce brancard est de se désolidariser en deux parties symétriques, ce qui permet le relevage de victime dans des situations difficiles.

1. CARACTÉRISTIQUES DU BRANCARD CUILLÈRE

Poids : 9 kg

Charge maximum : 150 kg

Longueur maximum (replié) : 1,19 m

Longueur maximum d'utilisation : 2,03 m

4 longueurs adaptables

2. MODE D'UTILISATION

Adapter la longueur en fonction de la taille de la victime. Bien verrouiller le système de réglage.

Séparer le brancard en deux parties à l'aide des verrous situés aux extrémités.

Engager chaque demi brancard sous la victime (sans trop la mobiliser) jusqu'à pouvoir verrouiller les extrémités.

Transporter la victime jusqu'au moyen de brancardage situé au plus près.

Enlever le brancard cuillère en déverrouillant les extrémités.

Le Brancard cuillère peut être désolidarisé uniquement d'un seul côté (tête ou pieds), ce qui facilite l'engagement du brancard sous la victime. (photo n°5)

Afin de faciliter l'engagement du brancard sous la victime, il est conseillé de boudiner les vêtements de cette dernière. (photo n°6)

3. ENTRETIEN

Le nettoyage et la désinfection se font selon le protocole en vigueur des matériels V.S.A.V.

Si des difficultés de coulissement se font sentir au niveau des tubes d'extension un léger graissage avec de la vaseline pourra être réalisé.

Remarque : Le portage du brancard doit se faire par les poignées pour éviter toute détérioration.

