

SEBAC

Le choix Naturel !



16 avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers
Tél: +33 141475656
Fax: +33 141475657
Mail: contact@sebac.com
Site internet: www.sebac.com

GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE DU RÉCHAUFFEUR ACCÉLÉRATEUR

FLUIDO




Gamme Hypothermie


Rev C - 1208

En aucun cas, ce guide ne remplace partiellement ou totalement le mode d'emploi du système Fluidor.

I—DESCRIPTIF DU SYSTÈME FLUIDO

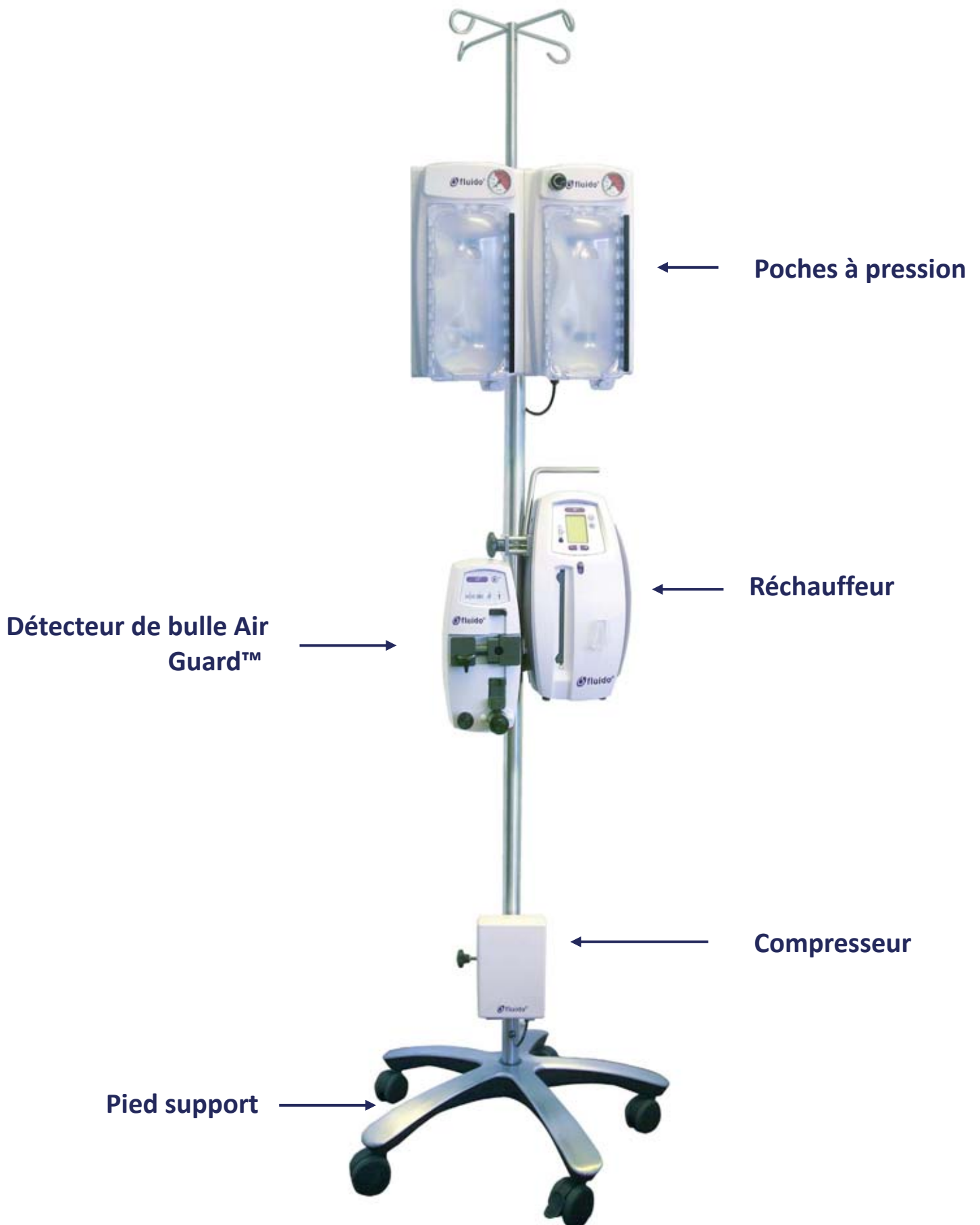


II – DESCRIPTIF DE LA CASSETTE TA500

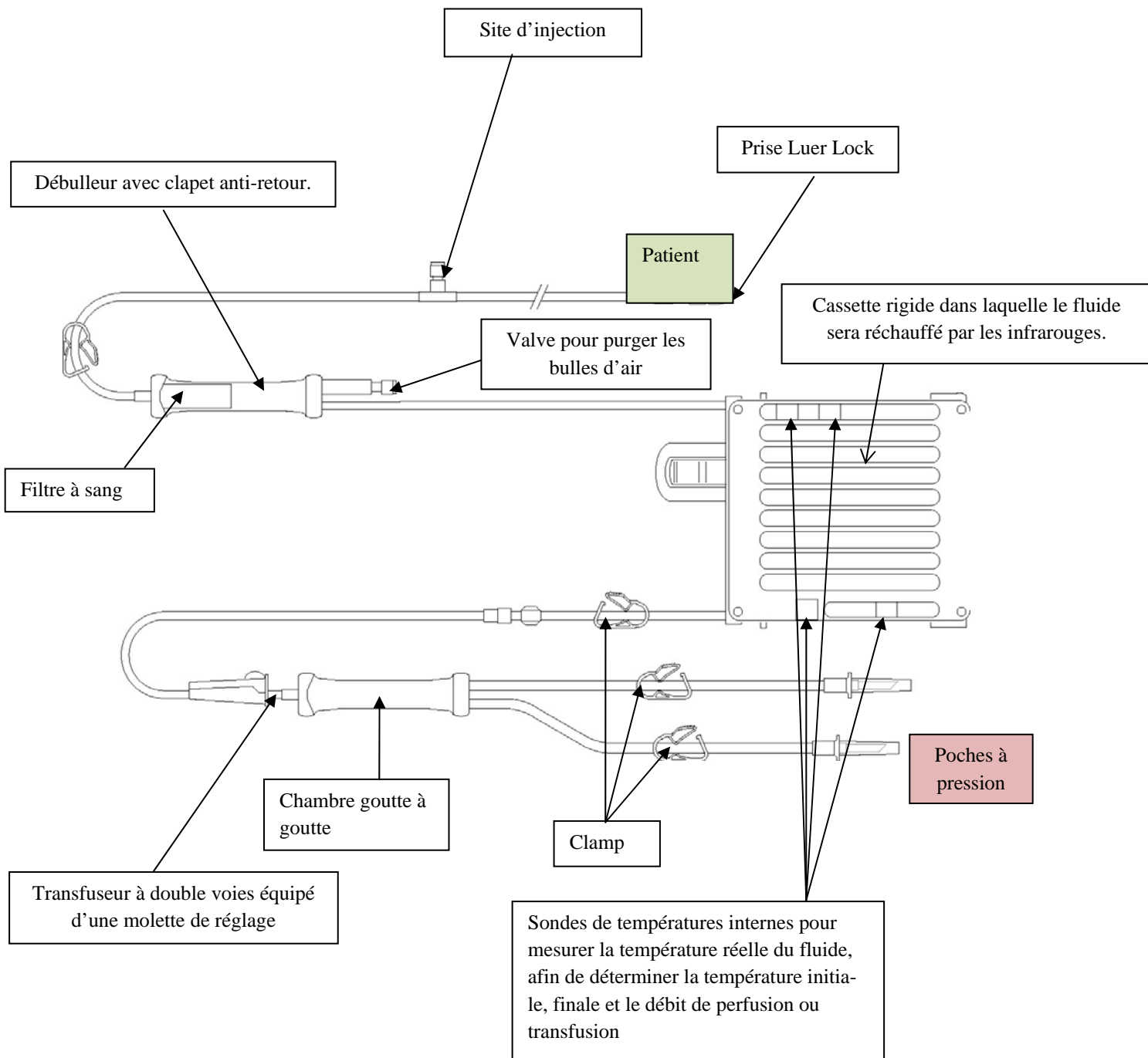

III – MISE SOUS TENSION DU FLUIDO

Le système Fluido nécessite une seule prise électrique 220 V commune aux différents modules (compresseur, réchauffeur et détecteur de bulle).

Vérifiez que les 3 voyants de mise sous tension électrique s'allument dès raccordement à une prise électrique.

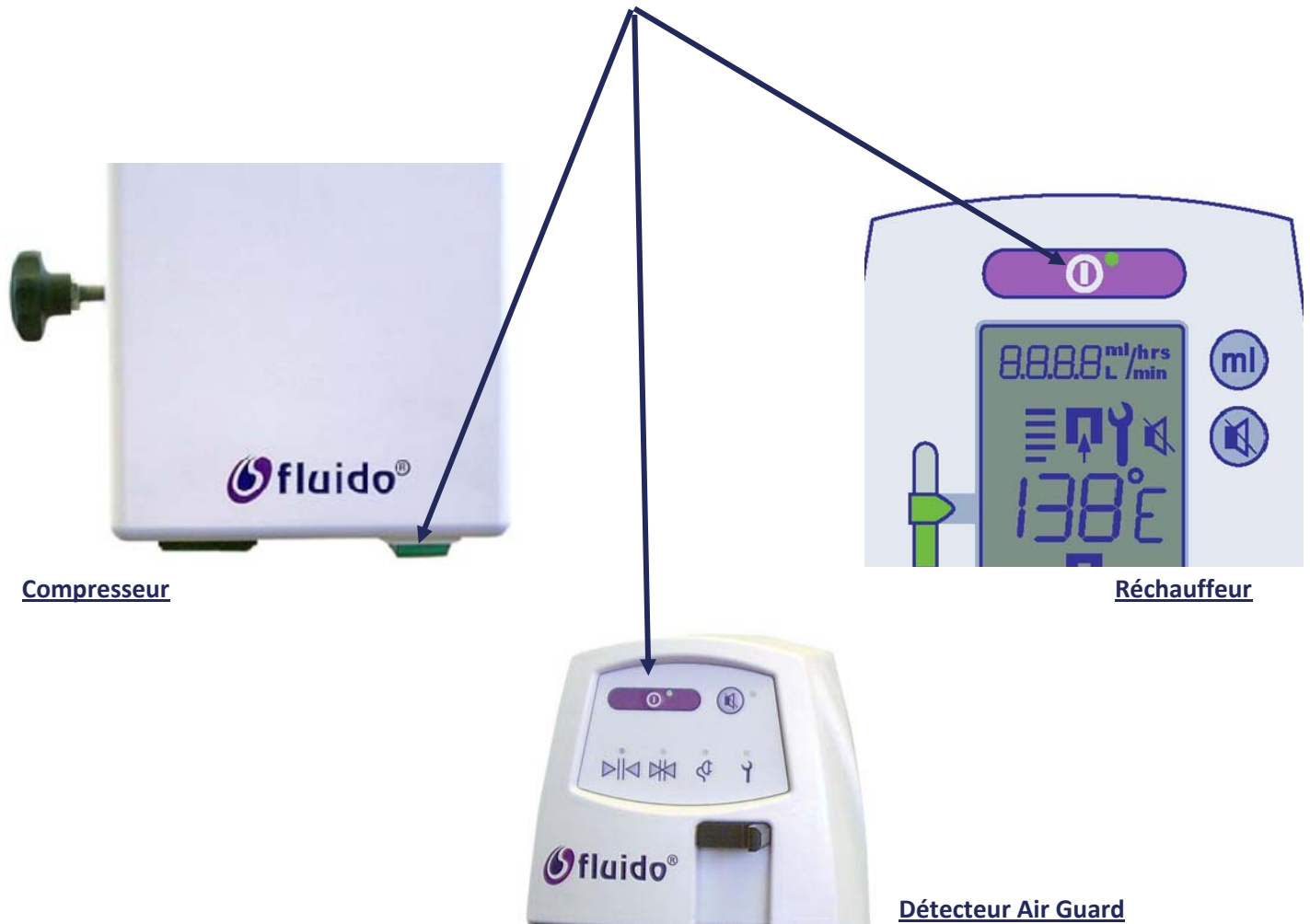

IV – INSTALLATION DE LA CASSETTE ET PURGE

A - Mettez le module réchauffeur en marche en appuyant sur le bouton correspondant. Le voyant passe de la couleur orange à verte.




B - Après l'apparition d'un bref signal sonore annonçant la fin de l'autotest, introduire la cassette coté brillant orienté vers la droite après l'apparition du logo suivant:




C - Après réalisation d'un nouvel autotest, l'affichage suivant apparait:




D - Fermez tous les clamps

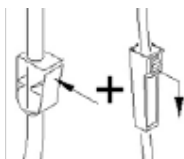


E - Percutez la ou les poches en fonction des besoins

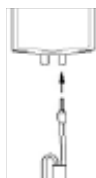

F - Retournez la chambre compte-gouttes

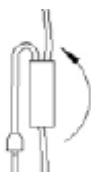


G - Ouvrez tous les clamps à l'exception à celui correspondant à la branche non utilisée du perfuseur

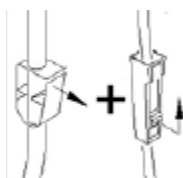


H - Retournez le débulleur et remplissez le complètement.




I - Purgez le reste de la tubulure puis clamez la ligne.

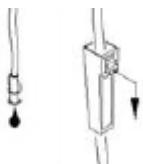

V - RÉGLAGE DU RÉCHAUFFEUR

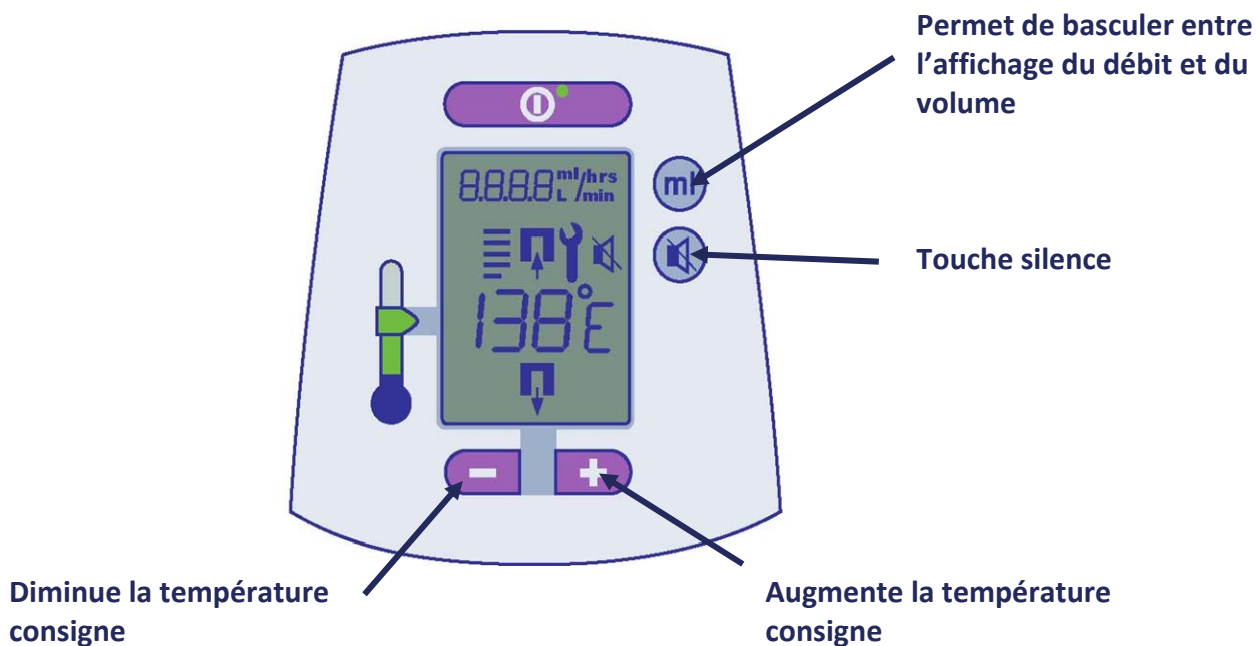

VI - UTILISATION DE L'ACCÉLÉRATEUR

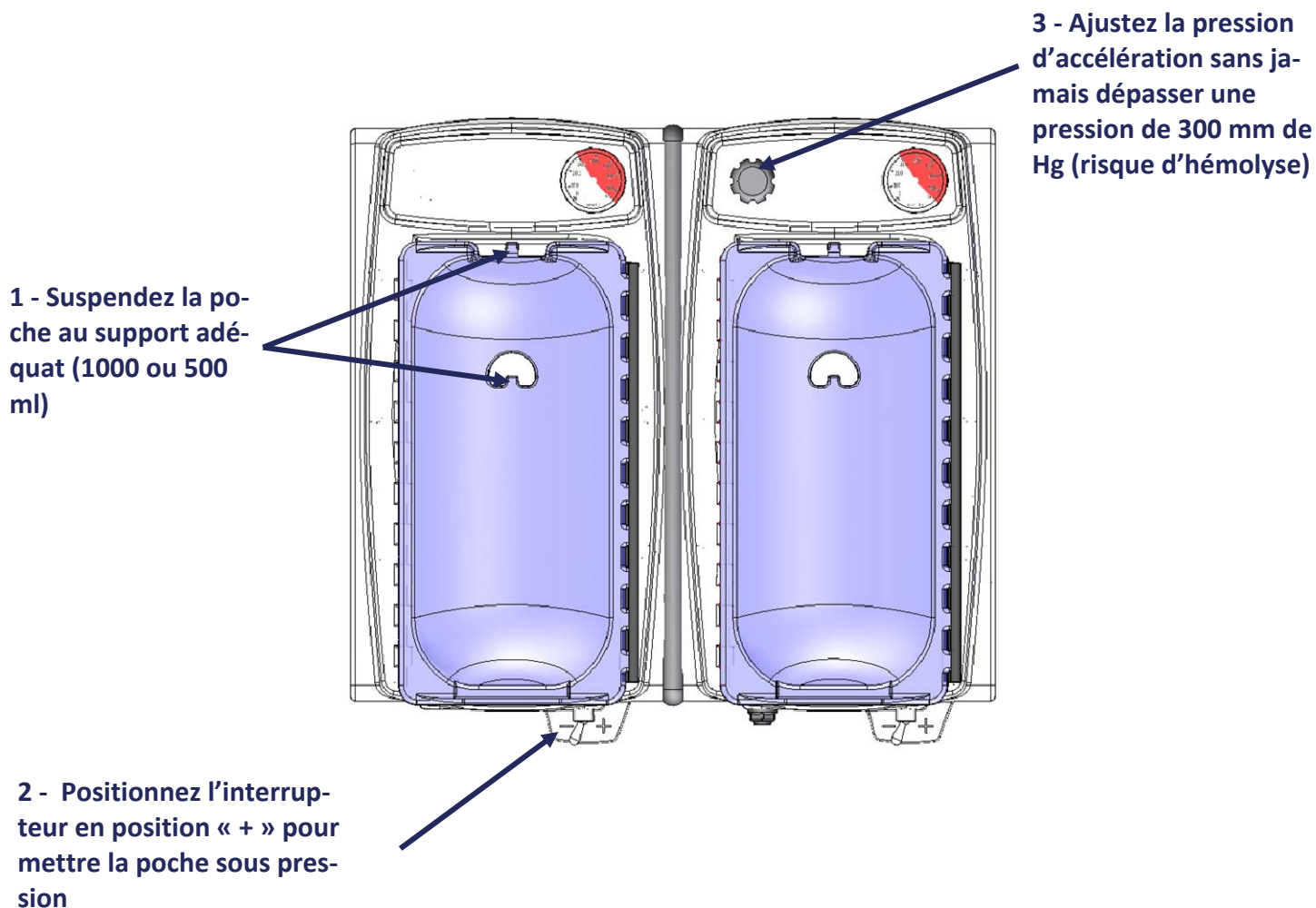


VII- MISE EN PLACE DU DÉTECTEUR DE BULLES



- A - ouvrez la pince en tournant la molette dans le sens anti-horaire
- B - positionnez le débulleur de la cassette jusqu'à la butée
- C - positionnez la tubulure dans le capteur de bon positionnement
- D - Ouvrez la valve en poussant; insérez la tubulure dans la valve puis relâchez
- F - Mettre en route le détecteur de bulle en appuyant sur le bouton « On / Off ». Le voyant témoin passe de l'orange au vert.

VIII- PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU RÉCHAUFFEUR

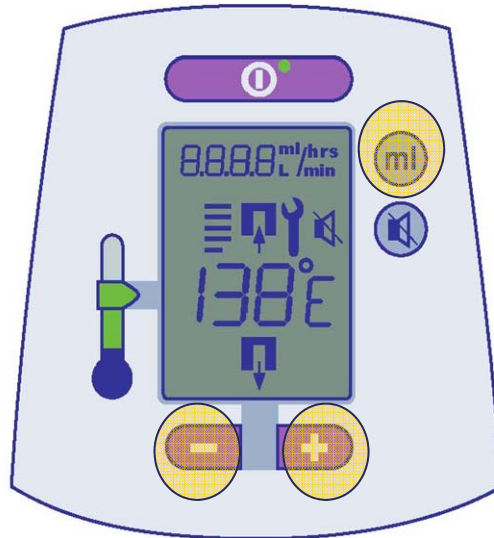

Appuyez simultanément sur les 3 touches « - » « + » et « ml ».

IX- PROCÉDURE DE DÉBULLAGE APRÈS ALARME DU DÉTECTEUR

Vissez une seringue sur la prise Luer-lock du débulleur et aspirez jusqu'à ce que les alarmes sonores et visuelles se coupent automatiquement. La valve de clampage s'ouvre pour assurer la perfusion.

