

Maintenanc

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

e

préventive

Maintenance préventive

10/13/2016/G. SCHMITT

1

Maintenanc

Récapitulatif de la maintenance sur 6 ans

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

| Année | Semestre | Référence | Désignation | Quantité |
|-------|----------|-----------|-------------|----------|
| 1 | 1 | | | |
| | 2 | MX08241 | Kit 1 an | 1 |
| 2 | 1 | | | |
| | 2 | MX08467 | Kit 2 ans | 1 |
| 3 | 1 | | | |
| | | MX08468 | Kit 3 ans | 1 |
| 4 | 1 | | | |
| | | MX08467 | Kit 2 ans | 1 |
| 5 | 1 | | | |
| | 2 | MX08241 | Kit 1 an | 1 |
| 6 | 1 | | | |
| | 2 | MX08995 | Kit 6 ans | 1 |


10/13/2016/G.SCHMITT
2

Maintenance


Composition des Kits

e

KIT 1AN

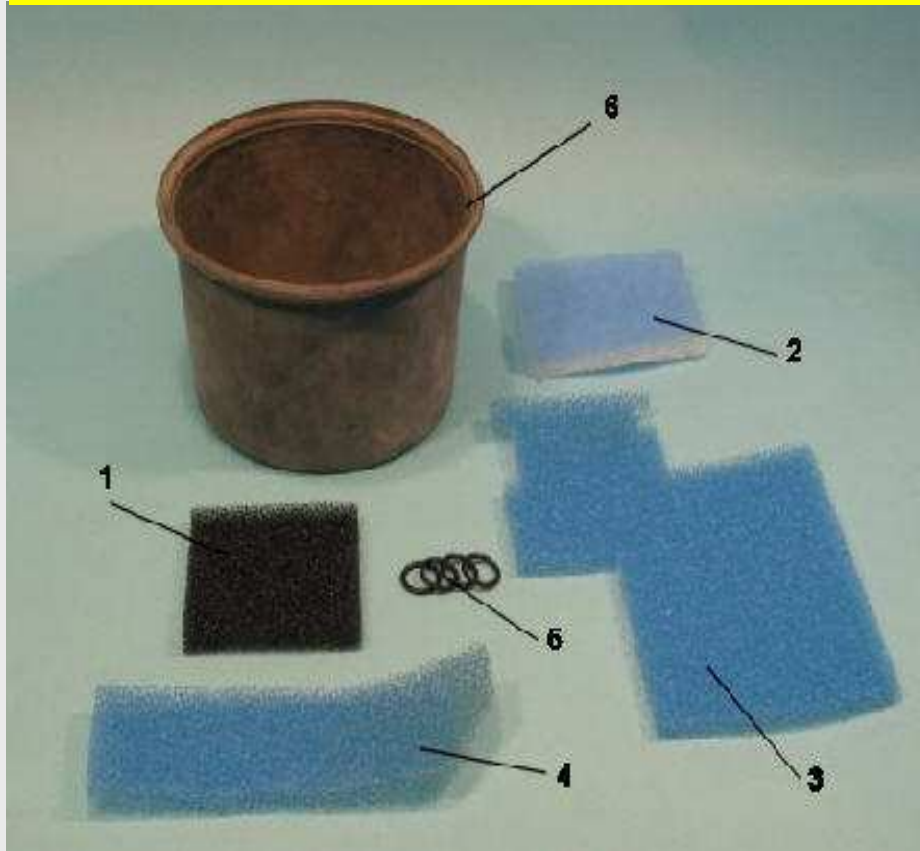

KIT 2 ANS

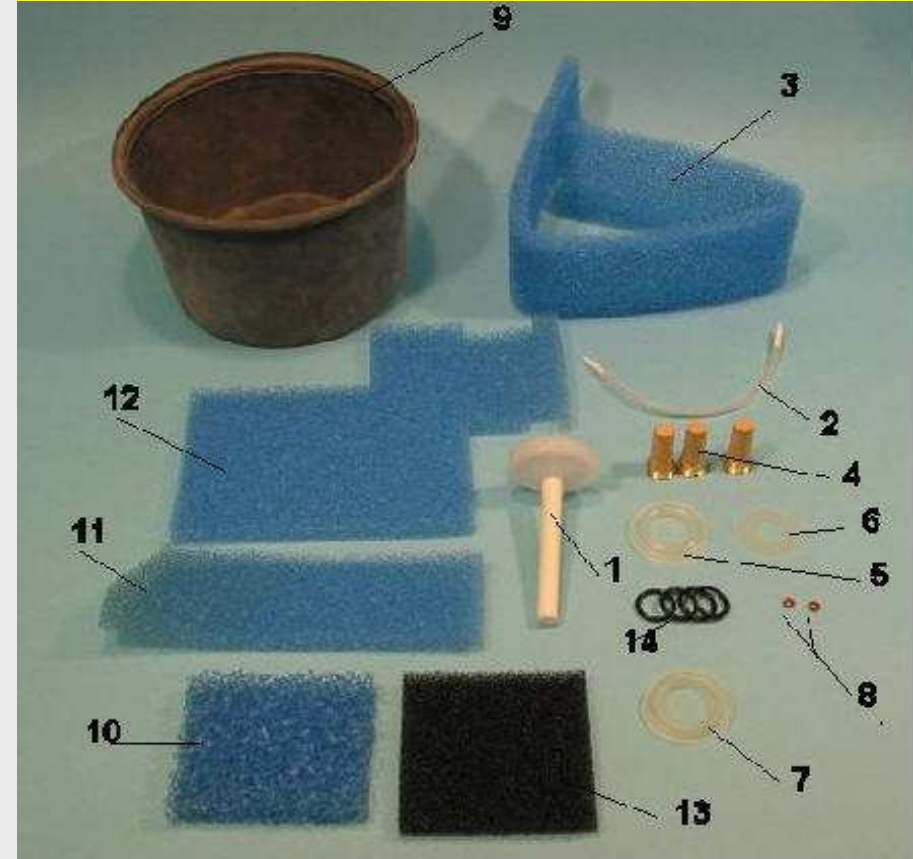

10/13/20
3

Maintenance

Composition des Kits

e

récurrente

KIT 3 ANS



KIT 6 ANS



10/13/2016
4


Maintenance

Composition du Kit annuel

é

préventive

| MX08241 | | Primus ServSet 1 Jahr | |
|---------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 2600650 | Membrane roulante | | 1 |
| 6870910 | Filtre poussiere (PGM) | | 1 |
| 8603144 | Filtre poussiere (petit, VGC) | | 1 |
| 8603301 | Filtre poussiere (grand, VGC) | | 1 |
| 8603662 | Filtre poussiere 80x80x10 (bloc | | 1 |
| U04314 | joint torique | | 4 |

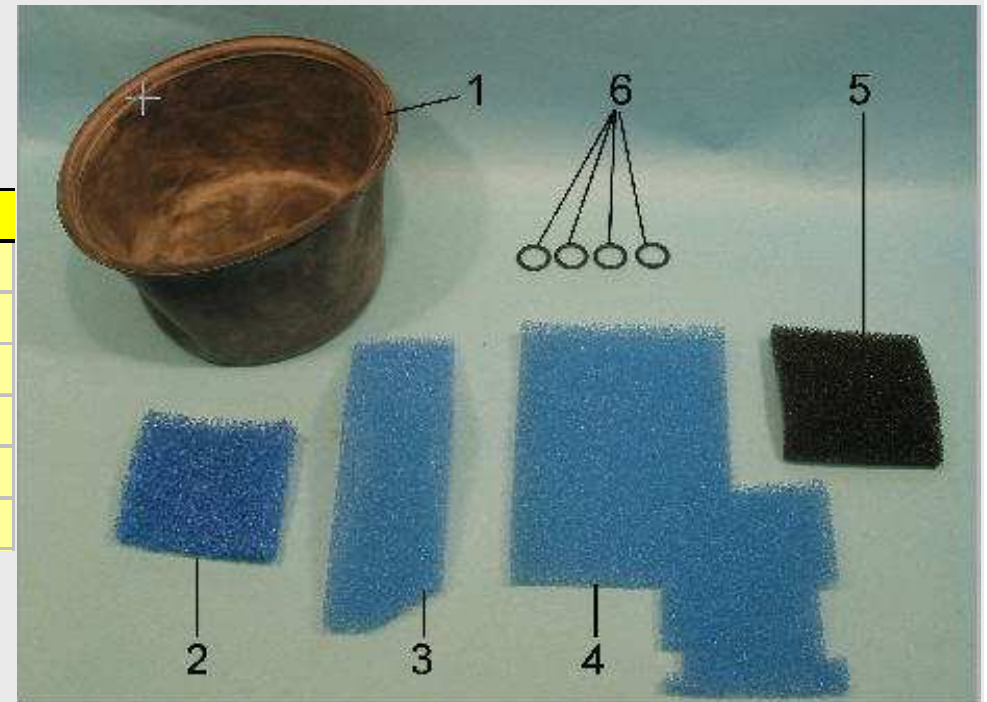

Maintenanc

Composition du Kit tous les 2 ans



e

préventive

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

| MX08467 | Primus ServSet 2 Jahr | |
|---------|---|---|
| 8402868 | filtre antibactérien | 1 |
| 8601238 | Tuyau Nafion | 1 |
| 8603585 | filtre poussière | 1 |
| 8603780 | membrane sup valve expi | 1 |
| 8603781 | membrane plat valve expi | 1 |
| M19238 | filtre entrée alim gaz | 3 |
| M33275 | membrane sup valve PEP | 1 |
| R52382 | joint torique bloc patient | 2 |
| 2600650 | Membrane roulante | 1 |
| 6870910 | Filtre poussière (PGM) | 1 |
| 8603144 | Filtre poussière (petit, VGC) | 1 |
| 8603301 | Filtre poussière (grand, VGC) | 1 |
| 8603662 | Filtre poussière 80x80x10 (bloc alim) | 1 |
| U04314 | joint torique | 4 |

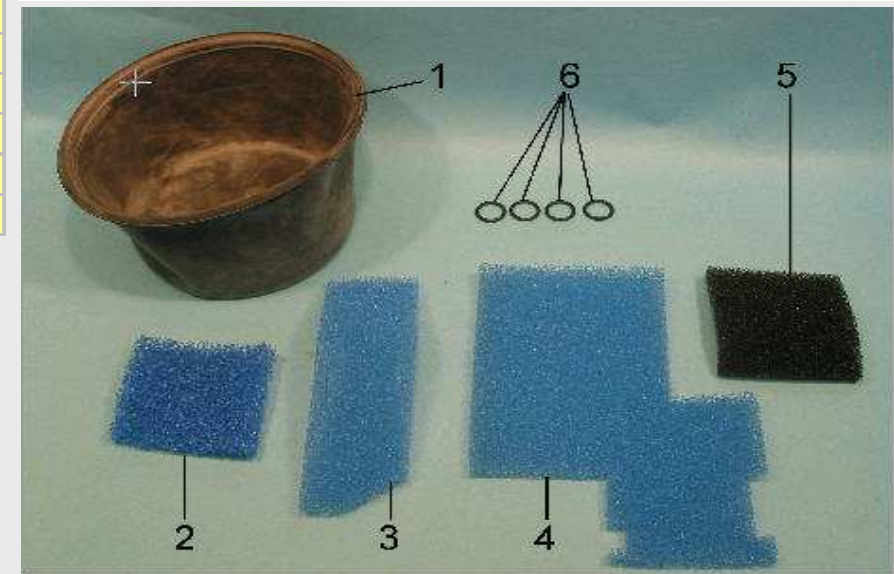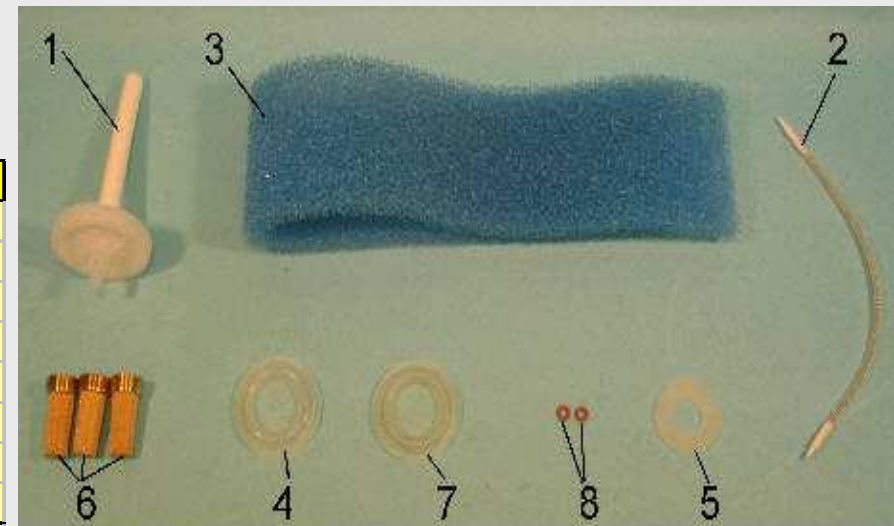

10/13/2016/G.SCHMITT
6

Maintenanc

Composition du Kit tous les 3 ans



e

préventive

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

| MX08468 | | Primus ServSet 3 Jahr | |
|---------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 2600651 | Membrane roulante | | 1 |
| 8603057 | batterie rechargeable | | 2 |
| 8604831 | joint membrane roulante | | 1 |
| 2600650 | Membrane roulante basse | | 1 |
| 6870910 | Filtre poussiere (PGM) | | 1 |
| 8603144 | Filtre poussiere (petit, VGC) | | 1 |
| 8603301 | Filtre poussiere (grand, VGC) | | 1 |
| 8603662 | Filtre poussiere 80x80x10 (bloc | | 1 |
| U04314 | joint torique | | 4 |


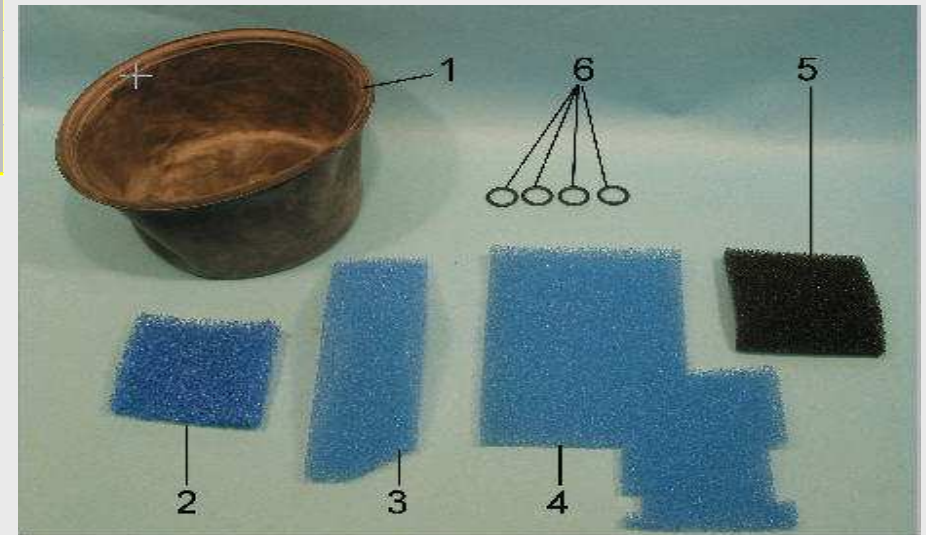
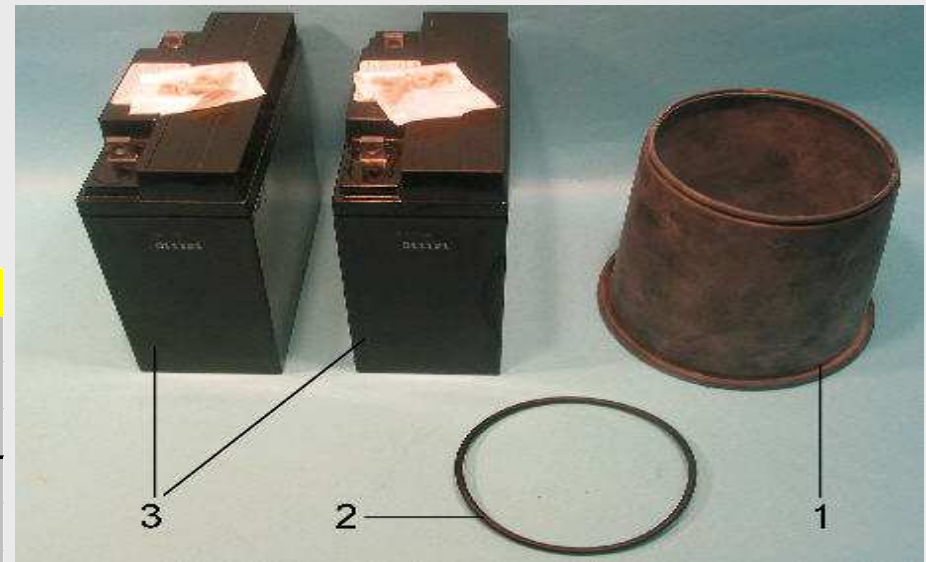


10/13/2016/G.SCHMITT
7

Maintenanc

Composition du Kit tous les 6 ans

| MX08995 Primus ServSet 6 Jahr | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 2600651 | Membrane roulante | 1 |
| 8603057 | batterie rechargeable | 2 |
| 8604831 | joint membrane roulante | 1 |
| 2600650 | Membrane roulante basse | 1 |
| 6870910 | Filtre poussiere (PGM) | 1 |
| 8603144 | Filtre poussiere (petit, VGC) | 1 |
| 8603301 | Filtre poussiere (grand, VGC) | 1 |
| 8603662 | Filtre poussiere 80x80x10 (bloc | 1 |
| U04314 | joint torique | 4 |
| 8413666 | Détendeur | 3 |

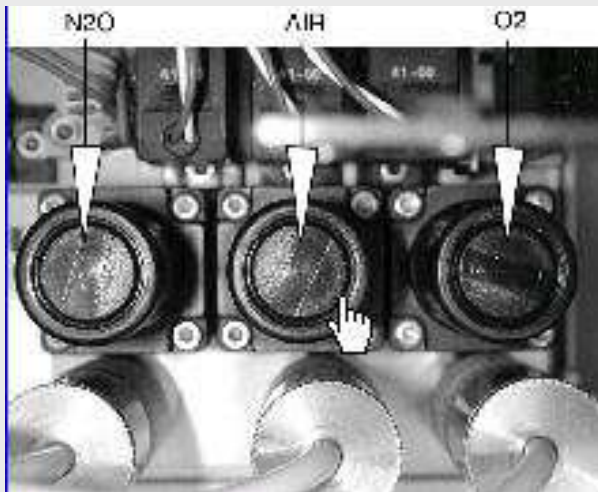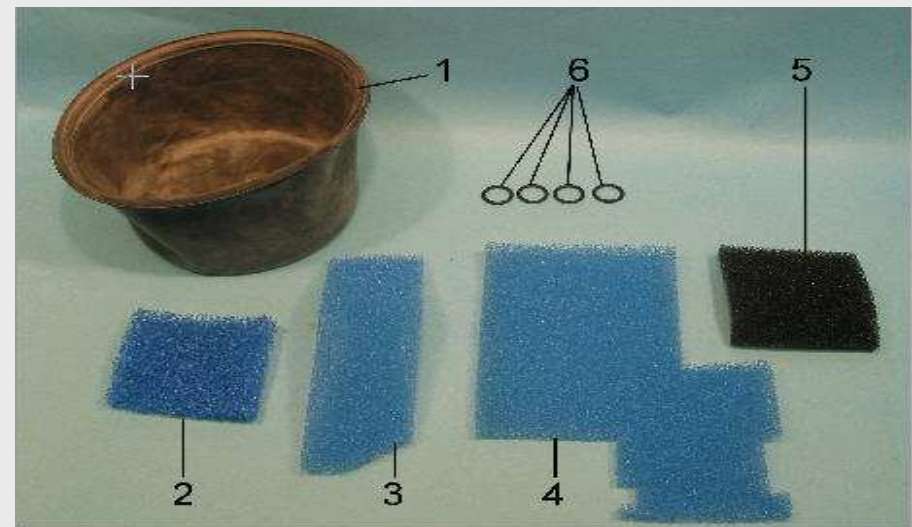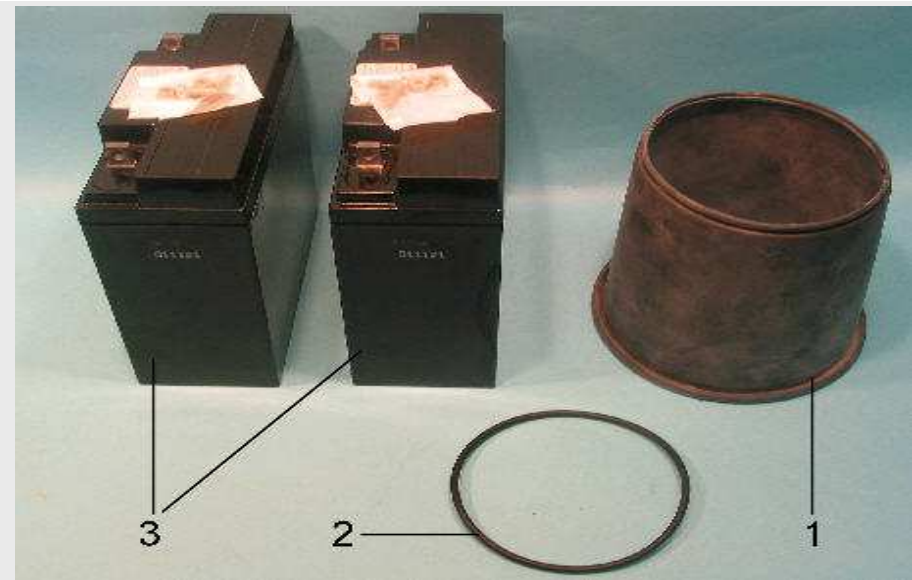

8 10/13/2016/G.SCHMITT


Maintenance

Position des composants des différents Kits

e

préventive


Filtre poussière
alimentation (8603662)

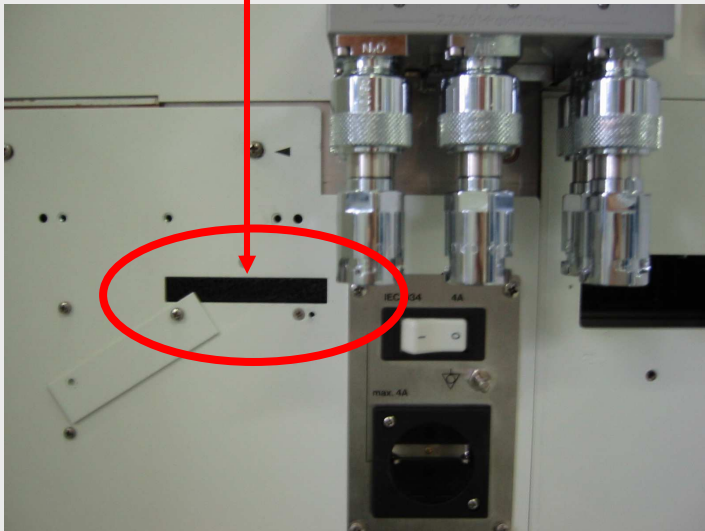

Filtre poussière
PGM (6870910)



Joint torique
(U04314)



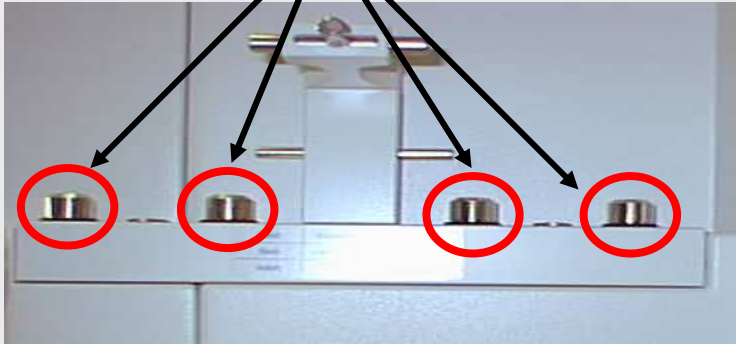


Maintenanc

Position des composants des différents Kits

e

p

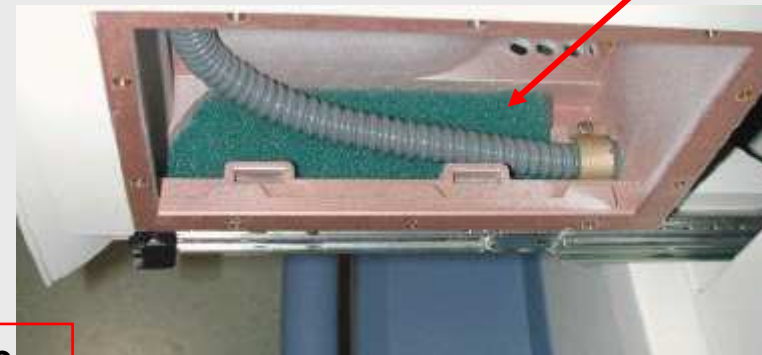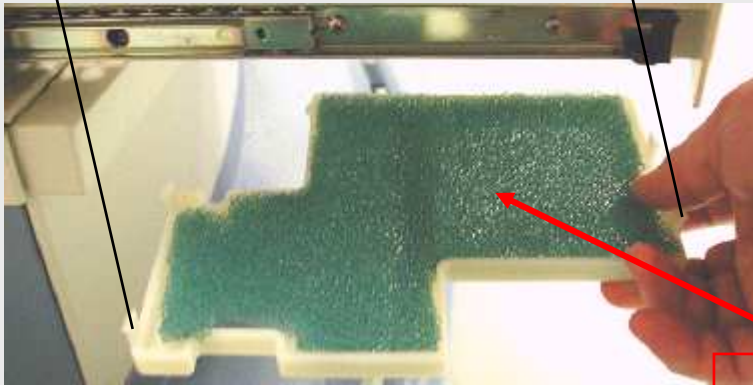
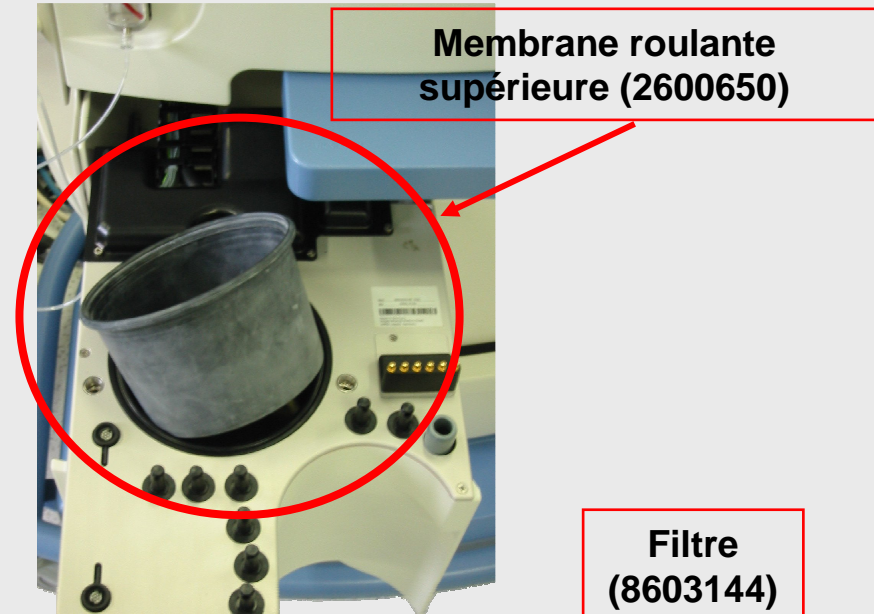


**Filtre
(8603301)**

**Filtre
(8603144)**


Maintenanc

Position des composants des différents Kits

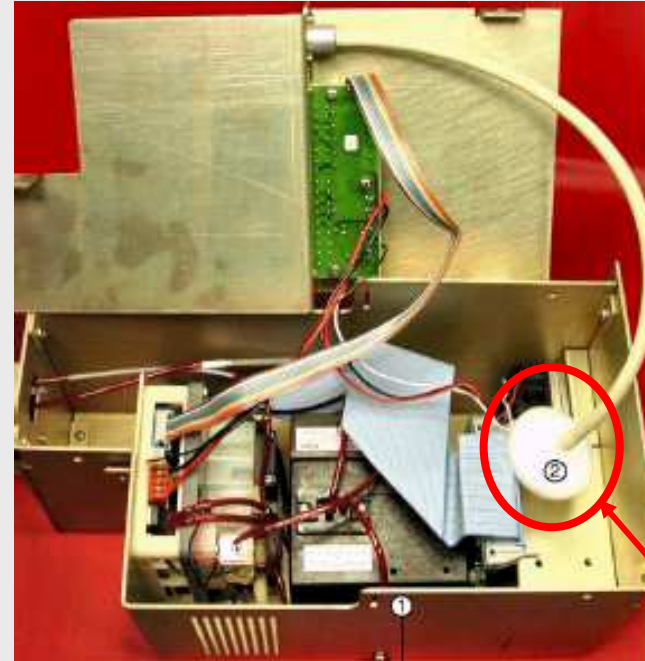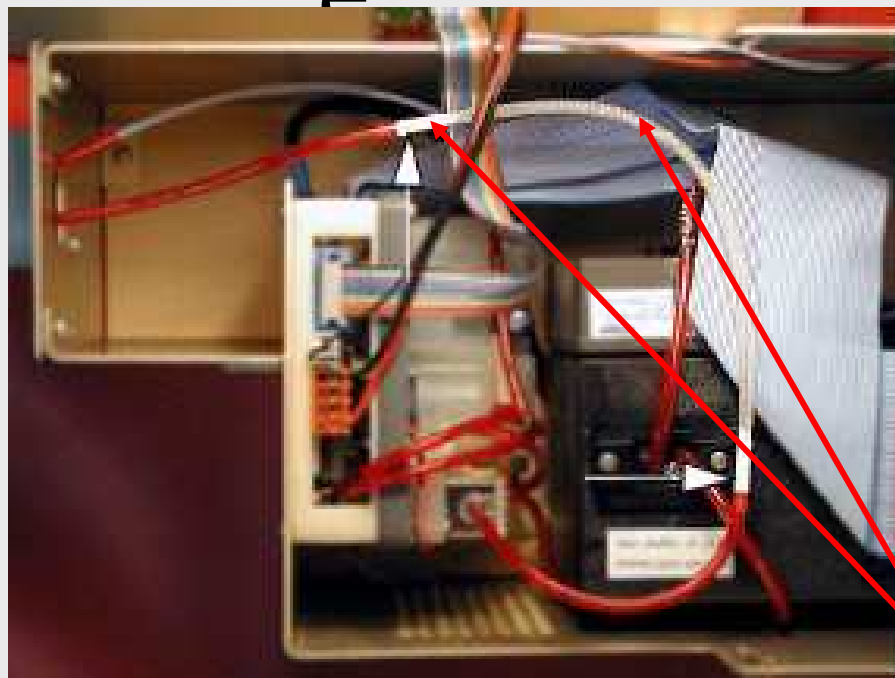

**Nafion
(8601238)**

**Filtre
(8402868)**

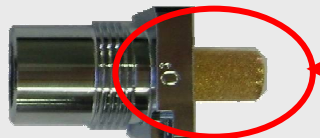

**Filtre alimentation en
gaz (M19238)**


10/13/2016/G.SCHMITT
1

Maintenanc

Position des composants des différents Kits

e

préventive

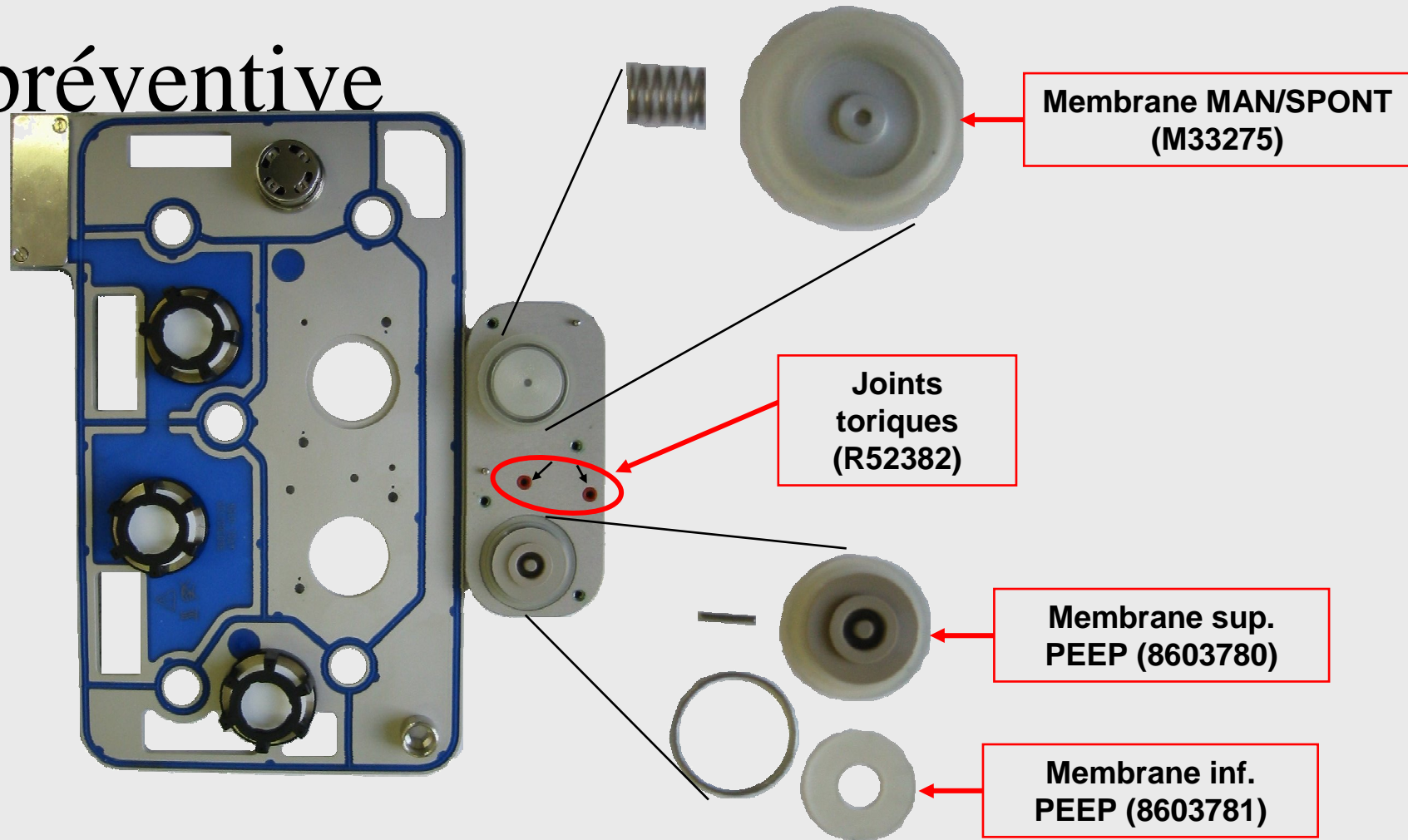


Maintenanc

Position des composants des différents Kits



**Filtre
(8603585)**

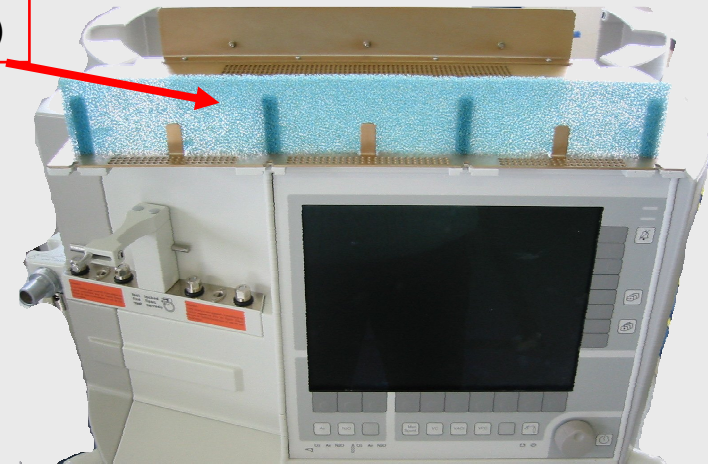


**Batteries
(8603057)**

10/13/2016/G.SCHMITT
1
2

Maintenanc

Position des composants des différents Kits

e
préventive


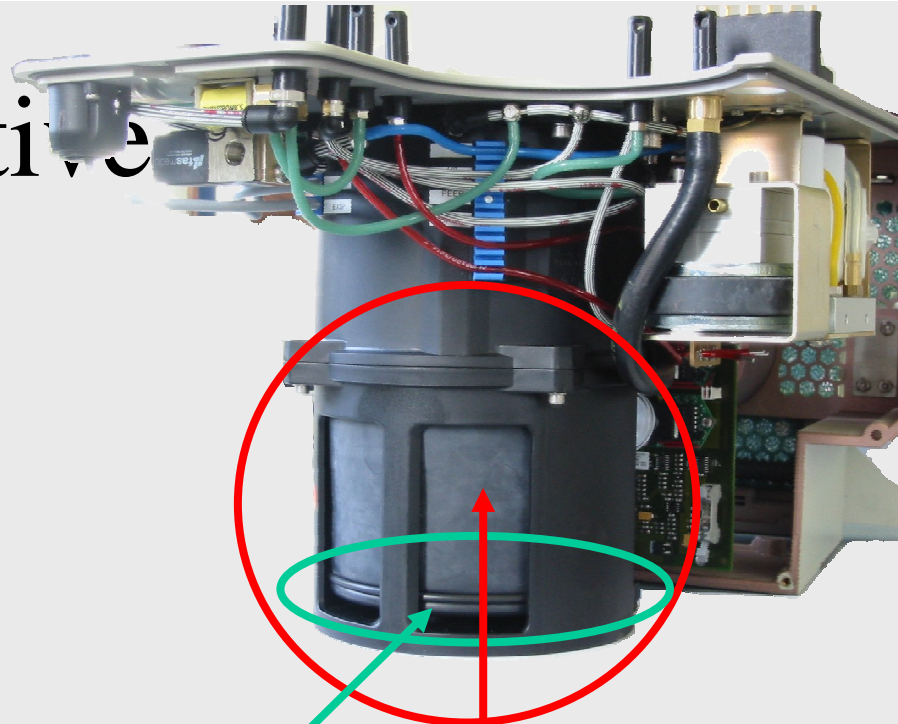


**Joint torique
(G60337)**

**Membrane roulante
inférieure (2600651)**

Maintenanc

Position des composants des différents Kits

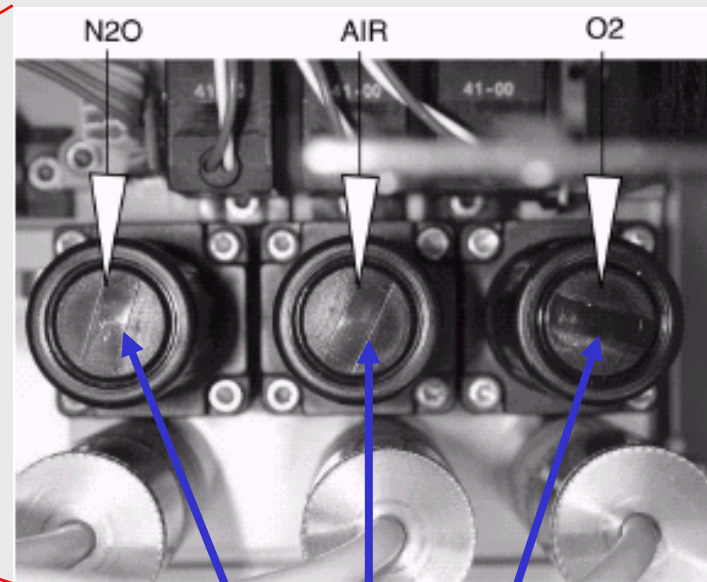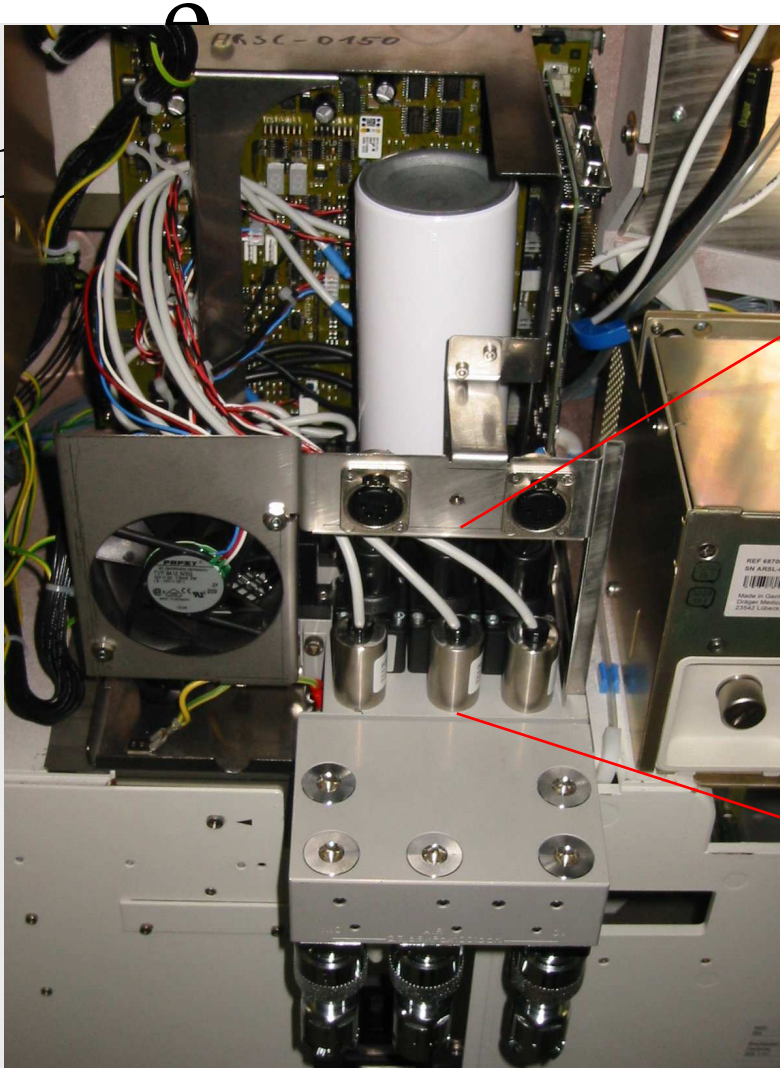

**Détendeurs
(8413666)**

10/13/2016/G.SCHMITT