

Attelle de DONWAY



Mode d'emploi

La pose d'une attelle de Donway est indiquée lors d'une fracture de la diaphyse fémorale.



Elle permet l'immobilisation et la traction du fémur concourant ainsi à l'analgésie du patient.


Mise en place de l'attelle de DONWAY (1)

1. Placer l'anneau ischiatique sous le genou et l'ajuster autour de la cuisse.
2. Attacher la boucle sans serrer.



Mise en place de l'attelle de DONWAY (2)


3. Appuyer sur la valve de décompression (manomètre = 0).

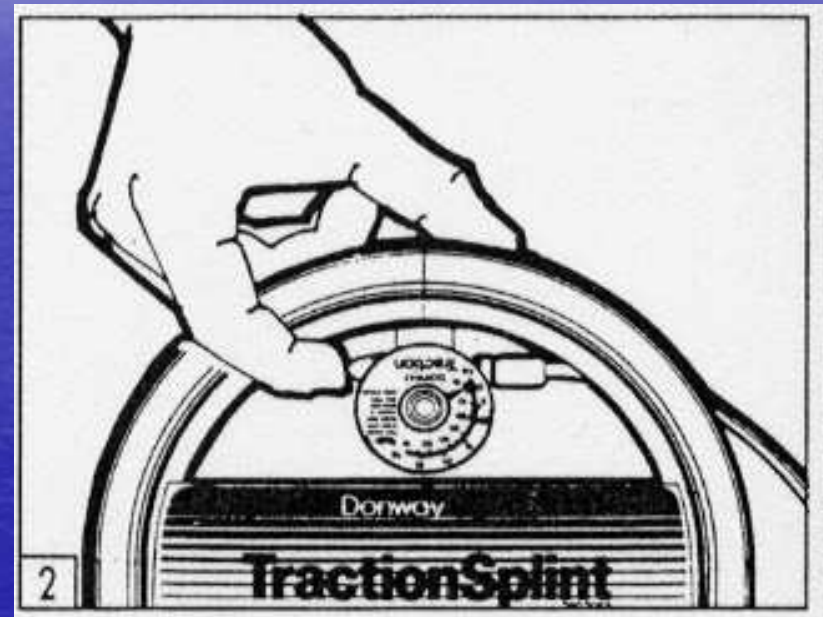

Mise en place de l'attelle de DONWAY (3)

4. Desserrer les bagues de serrage et relever le support de pied.


5. Placer l'appareil autour de la jambe.

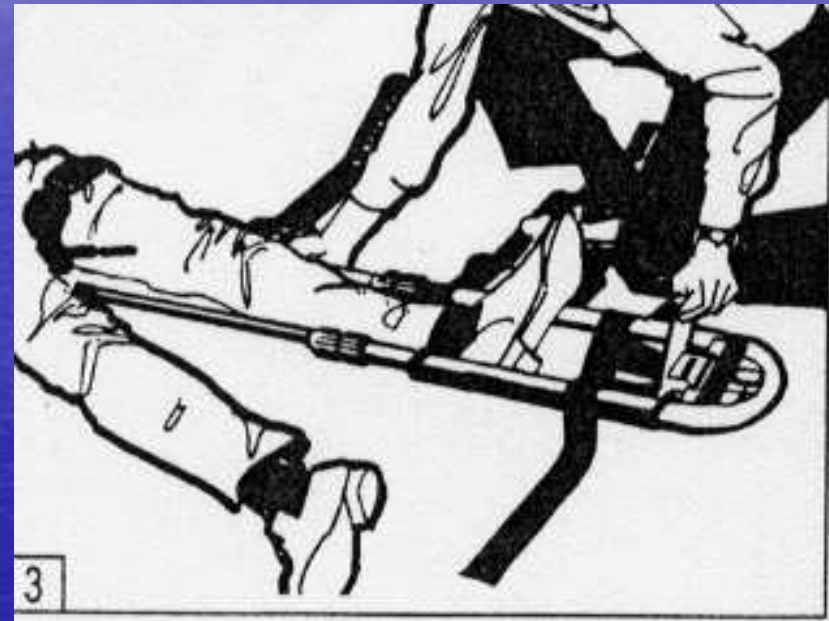

Mise en place de l'attelle de DONWAY (4)

6. Adapter les bras coulissants à la longueur voulue.

7. Les relier aux fiches de l'anneau ischiatique et serrer en tournant. Protéger l'appui pubien par 1 américain.

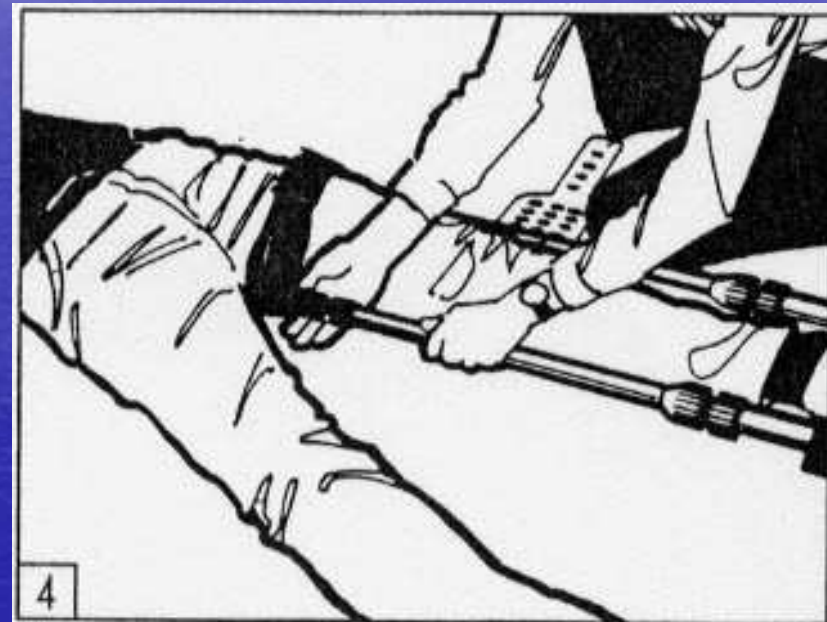


Mise en place de l'attelle de DONWAY (5)

8. Détacher la sangle de cheville.
9. Placer le talon sur la partie rembourrée de la sangle, le pied contre son support.




Mise en place de l'attelle de DONWAY (5)

10. Maintenir le talon contre le support de pied et ajuster le velcro inférieur pour que le support rembourré soit positionné en haut de la cheville

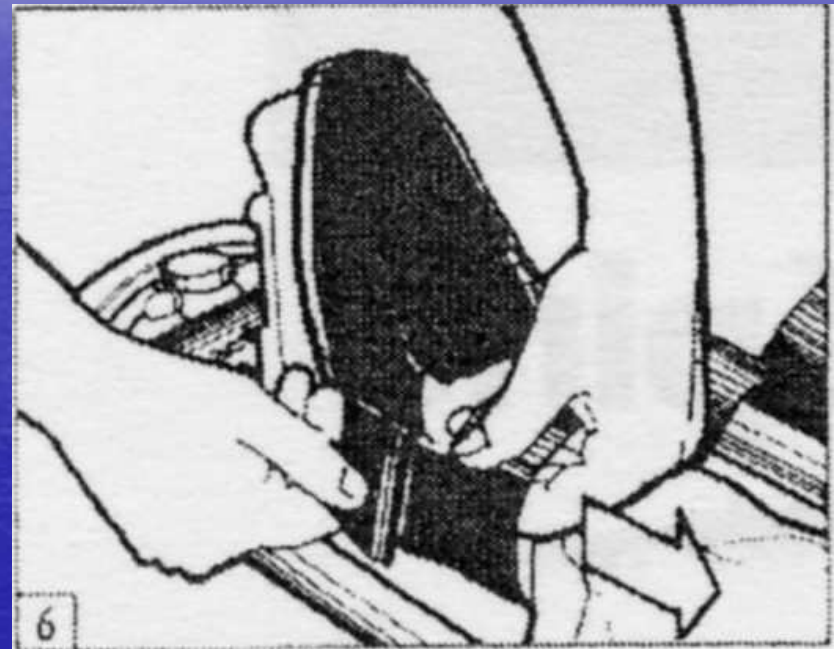


Mise en place de l'attelle de DONWAY (6)

11. Entrecroiser les sangles supérieures fermement au dessus du coup de pied.

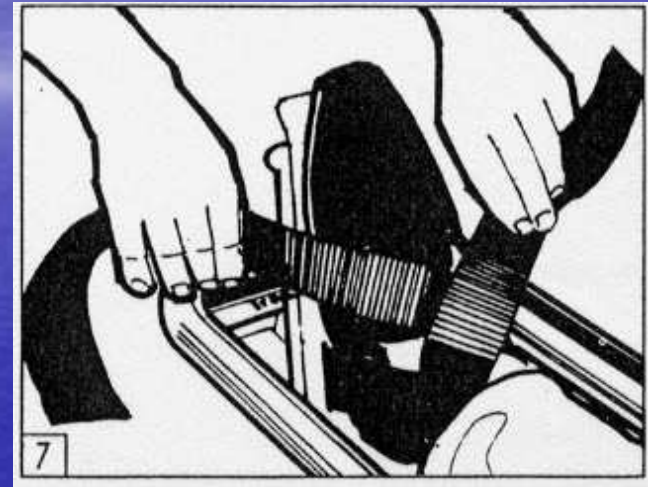


12. Serrer les sangles autour du support de pied et fixer avec l'attache velcro.

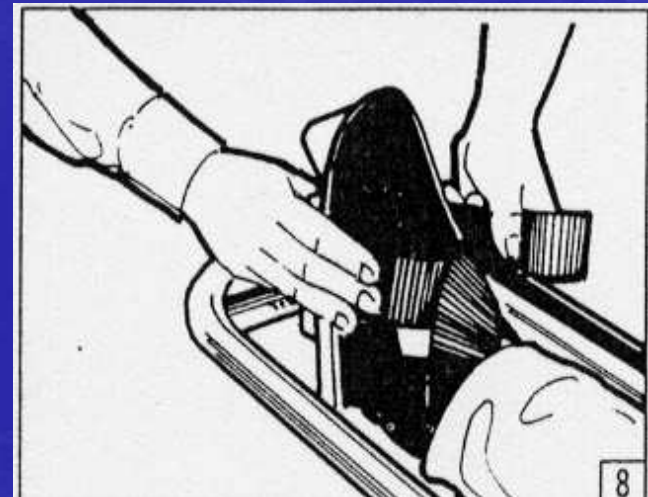

Mise en place de l'attelle de DONWAY (7)

13. Utiliser la pompe pour appliquer la pression de traction (10 à 18kg).

14. Serrer modérément la sangle de l'anneau ischiatique.

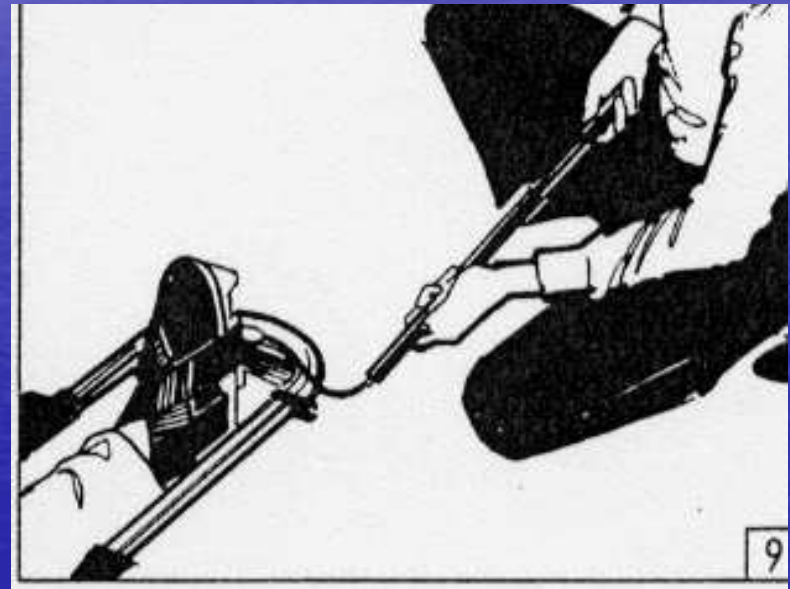


Mise en place de l'attelle de DONWAY (8)

15. Aligner les 2 supports de jambe ouverts au niveau du mollet et de la cuisse.




16. Passer la partie étroite sous la jambe, puis autour du bras coulissant et revenir sous la jambe, fixer après avoir régler la tension avec le bouton de serrage.

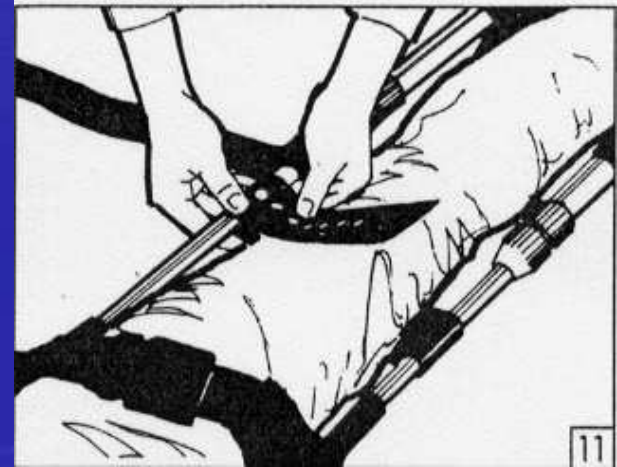

Mise en place de l'attelle de DONWAY (9)

17. Passer la sangle du genou sous la jambe.

18. Serrer au dessus du genou avec la boucle de fixation.

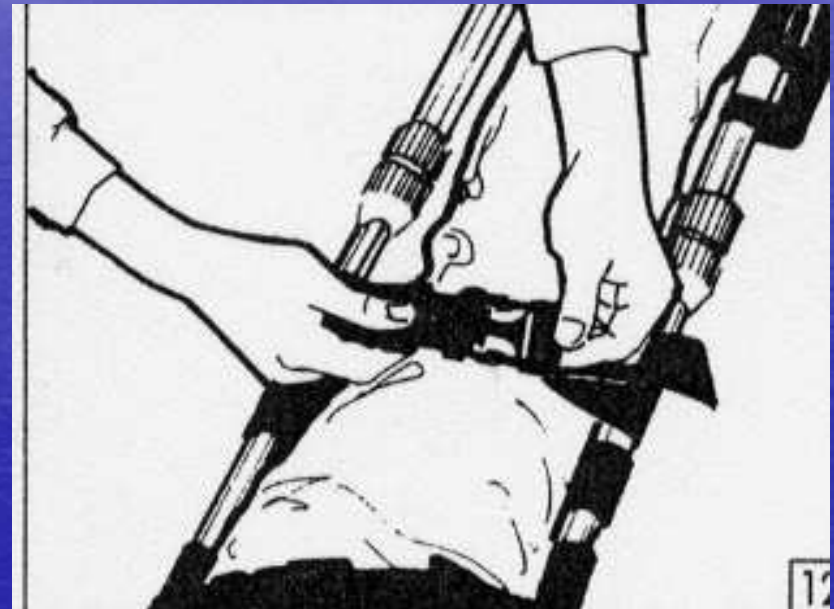

Mise en place de l'attelle de DONWAY (10)

19. Vérifier le niveau de traction, ajuster si besoin.

20. Verrouiller à fond les bagues de serrage pour bloquer la position des bras.

21. Relâcher la pression (manomètre = 0).

